

ЛИПИД

спрей за очи с липосоми и хиалуронова киселина 0,1%

Продуктът остава стерилен след първата употреба.

Активни съставки

– Фосфолипиден комплекс
– Натриев хиалуронат
Изотоничен буферизиран разтвор pH- 7,2,
съдържащ борат.
Без консерванти.

Форма и съдържание

Разтвор за очи под формата на спрей във флакон от 15ml.

Показания

Спрей за пръскане върху затворени очи. За овлажняване, облекчение и грижа при сухота в очите. Подходящ за употреба при уморени или раздразнени очи. Гарантира максимален комфорт при носене на всички видове контактни лещи.

Хиалуроновата киселина е естествен лубрикант, който предотвратява и облекчава дразненето в очите, причинено от полени или прах, липса на слъзен филм, или от твърде продължително носене на контактни лещи.

Дозировка и начин на приложение

Спреят за пръскане върху затворени очи е създаден така, че да достига бавно до очната повърхност през клепача. Затворете клепача на окоето и дръжте флакона на около 10см разстояние от очите. Не пръскайте директно в окоето! При първата употреба след отварянето натиснете няколко пъти бутона на помпичката, за да се напълни дюзата. Пръснете веднъж или два пъти върху всеки един от клепачите. Ако е необходимо, прилагайте продукта по няколко пъти на ден.

Функции

Хиалуроновата киселина под формата на натриев хиалуронат е биологичен полизаха-

рид със същата молекулярна структура като вътрешността на окоето.

Хиалуроновата киселина подобрява рехидратацията и намалява риска от усещане за сухота в очите, което е особено важно за носещите контактни лещи.

Странични ефекти

При употреба в съответствие с инструкциите за приложение не са известни странични ефекти.

Предозиране

Няма потвърдени случаи на предозиране.

Срок на годност и съхранение

Не използвайте след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност е посочен върху флакона до символа пясъчен часовник. Съхранявайте на хладно и сухо място. Не излагайте на топлина или пряка слънчева светлина.

Предупреждения и предпазни мерки

Да се съхранява на място недостъпно за деца. Пазете далеч от източници на топлина и пряка слънчева светлина. Не поглъщайте. Не пръскайте директно в очите. Не използвайте при неводоустойчив грим за очи - липозомите могат да пренесат в окоето компоненти на грима. Не използвайте след изтичане на срока на годност. Медицинско изделие.

За допълнителна информация се обърнете към:
Pharmaselect Handels GmbH,
Ernst-Melchior-Gasse 20,
A-1020Wien,
Email: info@pharmaselect.com
www.pharmaselect.at

Официален Дистрибутор за България:
СТИНГАД , София 1592, бул. "Асен Йорданов"
№ 6; ФАРМНЕТЕАД, София 1832, район
Кремиковци, ул. "Япаджа" №6



Innomedis AG
Walther-Rathenau-Str. 5
D-50996 Köln, Германия

Притежател на разрешението за употреба
Pharmaselect International Beteiligungs GmbH
Ernst-Melchior-Gasse 20
A-1020Wien, Австрия



STERILE A



0481

Последна редакция:
11.2017 г.
OKSBG101-01-1712