

ОКУЦЕЛЛ®

КЛАСИК

Капки за очи с хипромелоза 0,5 %

Описание

Окуцелл® класик 0,5 % капки за очи представляват стерилен, вискоеластичен, прозрачен, защитен филм за роговицата на очите. Окуцелл® класик 0,5% капки за очи овлажнява повърхността на очите и така успокоява и защитава очите. Като резултат Окуцелл® класик 0,5 % капки за очи упражняват ефект на дълготрайно облекчение на оплакванията, предизвикани от механичен стрес, например в случай на диагностични интервенции на окото, неблагоприятни въздействия на околната среда (напр. от климатик), вятър, студ, суша или замърсяване на въздуха (напр. от цигарен дим), или в случай на визуален стрес, когато се изисква интензивно виждане (напр. компютърни екрани, микроскоп или продължително шофиране).

Приложение

Флаконът е запечатан със защитен пръстен. Отворете флакона, като завъртите капачката на винт наляво. Наклонете главата си леко назад, погледнете направо и внимателно дръпнете долния клепач далеч от окото. Задръжте флакона с отвора надолу и накапвайте по 1 капка в конюнктивалния сак на всяко око, 3 до 5 пъти дневно. Затворете очите си бавно, за да се осигури равномерно разпределение на течността върху повърхността на окото. Избягвайте контакт на ръцете или очите с отвора на флакона. Останалата капка трябва да се отстрани чрез леко потупване на дъното на флакона. Затворете флакона с капачката след употреба. Ако оплакванията Ви продължават, обърнете се към Вашия очен лекар!



Състав

1ml съдържа: хипромелоза 0,5%, бензалкониев хлорид 50% разтвор 0,2mg, натриев хлорид, натриев дихидроген фосфат, натриев монохидрогенфосфат, вода за инжекции.

Опаковка

Бял пластмасов многодозов флакон от 10ml с апликатор-капкомер, затворен с капачка на винт със защитен пръстен. 1 (един) флакон е поставен в картонена кутия.

Предпазни мерки и предупреждения

- Не използвайте, ако цялостта на пръстена на капачката е нарушена или ако флакона е повреден.
- Недокосвайте флакона до окото.

OKZBG102-05-2201

Официален Дистрибутор за България:

СТИНГ АД

София 1592, бул. Асен Йорданов № 6

ФАРМНЕТ ЕАД

София 1839, м. Япаджа № 6

ФЪОНИКСФАРМА ЕООД

София 1700, ул. Околовръстен път № 199А

- Дане се прилага в случай на свръхчувствителност към някоя от съставките.
- Избягвайте контакт с меки контактни лещи. Бензалкониевият хлорид може да предизвика тяхното обезцветяване. Контактните лещи трябва да се отстранят преди накапването на продукта и да се поставят обратно най-рано 15 минути след приложението му.
- Ако използвате друго лекарство за очи (капки, маз), изчакайте около 15 минути.
- Окуцелл® класик 0,5% капки за очи трябва се прилага след другите лекарства за очи.
- Не използвайте при инфектирано или наранено око.
- Зрителната острота може да намалее след прилагане; в този случай изчакайте докато нормалната зрителна острота се възстанови, преди да шофирате или работите с машини.
- Не използвайте капките за очи след изтичане срока на годност. Срокът на годност е отпечатан върху етикета на флакона и кутията.
- Окуцелл® класик 0,5 % капки за очи съдържа фосфатен буфер. При продължително използване, както и при функционални увреждания на роговицата, приложението на Окуцелл® класик 0,5 % капки за очи може да доведе до натрупване на калциеви соли в роговицата.
- Капките за очи могат да се използват до 4 седмици след отваряне на флакона.

Съхранение

Да се съхранява над 2°С и под 25°С. Да не се замразява. След употреба флакона да се затваря с капачката. Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

LOT номер на партида и **EXP** "срок на годност" са отпечатани върху етикета на флакона и кутията.

STERILE A Асептично производство

i Указанията за употреба и начина на приложение са посочени в листовката.

25°C Температура на съхранение

⊘ Не използвайте продукта, ако цялостта на пръстена на капачката е нарушена или ако флакона е повреден.



Производител:
Penta Arzneimittel GmbH
Werksstrasse 3
92551Stulln, Германия

CE 0483