

Окуцелл

едно

Капки за очи без консерванти – Натриев хиалуронат 0,2%

ОПИСАНИЕ:

Окуцелл едно капки за очи представляват: стерилен, вискоеластичен, бистър защитен филм за роговицата без консерванти. Състоят се изцяло от естествени, биологически вещества. Окуцелл едно капки имитират ефекта на естествените слъзи. Те защитават, овлажняват и смазват очната повърхност. Това предоставя дълготрайно облекчение за очи, които са сухи поради:

- Сухкератоконюнктивит (синдром на Съогрен);
- Увреждания, ерозия, операции на роговицата;
- Носене на контактни лещи;
- Хормонални увреждания (менопауза);
- Климатични, вятър, студ, суха топлина, прах, дим, замърсяване на въздуха;
- Работа пред компютърен екран, продължително пътуване с кола, полети на дълго разстояние;
- Плуване в хлорирана вода.

СЪСТАВКИ:

Натриев хиалуронат 0,2%,
натриев хлорид,
натриев хидрогенфосфат,
натриев дихрогенфосфат и
пречистена вода

СЪХРАНЕНИЕ:

Да се съхранява от 2°C до 25°C. Да се пази от замръзване.



Hersteller/Výrobce/Výrobca/ПРОИЗВОДИТЕЛ:
i.com medical GmbH, Kaflerstr. 15, 81241 Munich,
Germany/Германия/Nemecko/Německo

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Да не се използват, ако пластмасовото пръстенче на капачката е повредено.
- Не допирайте окото с флакона.
- Поради риск от замърсяване, избягвайте контакта на върха на флакона с ръцете Ви или с други повърхности.
- Да не се използват заедно с други лекарства за очи.
- Да не се прилагат при очна инфекция.
- Непосредствено след употреба зрителната острота може да бъде временно намалена, в такъв случай не работете с машини и не шофирайте, докато не се възстанови нормалното зрение.
- Запишете датата на първоначалното отваряне на флакона на самия флакон.
- 6 месеца след като пластмасовото пръстенче на капачката е отстранено, флаконът трябва да бъде изхвърлен с битовите отпадъци.


РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА:

10 мл


За допълнителна информация, моля, свържете се с:
Pharmaselect Handels GmbH,
Ernst-Melchior-Gasse 20,
A-1020 Wien,
Email: info@pharmaselect.com
www.pharmaselect.at

Официален Дистрибутор за България:
СТИНГ АД, София 1592,
бул. "Асен Йорданов" № 6;
ФАРМНЕТ АД, София 1832,
район Кремиковци, ул.
"Япаджа" № 6


ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

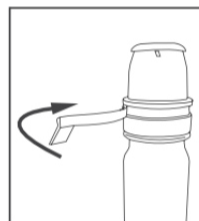


1. Откъснете пръстенчето на капачката преди първата употреба; Окуцелл едно може да се използва до 6 месеца.

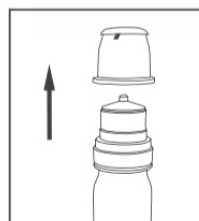

2. Отстранете капачката.

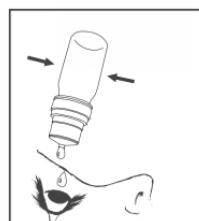

3. Като приложите натиск странично върху флакона, капнете една капка директно върху окото или контактните лещи.

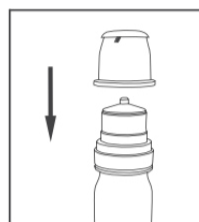

4. Следупотреба върнете капачката на флакона на мястото ѝ; 6 месеца след първото отваряне, флаконът трябва да бъде изхвърлен заедно с битовите отпадъци.

Stand/Revize textu/Revizia textu/ Дата на актуализиране: 09.2021