

# ОКУЦЕЛЛ

pharmaselect.



## релийф

### Спрей за очи с липозоми и очанка

Продуктът остава стерилен след първоначалната употреба.

#### Активни съставки

Фосфолипиден комплекс

Растителни екстракти:

- Екстракт от каперси (*Capparis spinosa*)
- Имортела (*Helychrysum italicum*)
- Обикновена очанка (*Euphrasia officinalis*)
- Женско биле (*Glycyrrhiza glabra*)

Изотоничен буфериран разтвор с pH 7,2, съдържащ борат

Без консерванти

#### Форма и съдържание

Разтвор за очи под формата на спрей във флакон от 15 ml

#### Индикации

Спрей за пръскане върху затворени очи на основата на липозоми и растителни екстракти. Активните съставки имат облекчаващо действие при алергии, причинени от полени, прах и други външни фактори. Редовна употреба на спрея за очи води до образуване на тънък защитен слой върху повърхността на очите, който отблъсква алергените от очната повърхност.

#### Дозировка, начин и срок на приложение

Затворете клепача на окото и дръжте флакона на около 10 см разстояние от очите. Напръскайте затвореното око веднъж или два пъти. Не пръскайте директно в окото! При нужда прилагайте продукта по няколко пъти на ден. При първоначалната употреба след отваряне на флакона напompайте неколkokратно, за да напълните дюзата.

#### Странични ефекти

При употреба по предназначение не са известни нежелани странични ефекти.

#### Предозиране

Не са потвърдени случаи на предозиране.

#### Срок на годност и съхранение

Използвайте продукта само до датата на изтичане на годността, посочена върху опаковката. Ще откриете тази дата върху флакона до символа с пясъчен часовник. Съхранявайте на сухо място при стайна температура.

#### Предупреждения и предпазни мерки ⚠

Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Не излагайте на топлина или на пряка слънчева светлина. Не прилагайте вътрешно. Не използвайте след изтичане на срока на годност. Не използвайте при алергии или свръхчувствителност към посочените съставки. Не използвайте с водоразтворим грим – липозимите могат да пренесат съставките на грима в окото.

#### Медицинско изделие

#### За повече информация се обръщайте към:

Pharmaselect Handels GmbH,  
Ernst-Melchior-Gasse 20,

#### Официален Дистрибутор за България:

СТИНГ АД, София 1592, бул. "Асен Йорданов", № 6; ФАРМНЕТ ЕАД, София 1832, район, Кремиковци, ул. "Япаджа" №6



Innomedis AG  
Walther-Rathenau-Str. 5  
D-50996 Köln, Германия



5°C 30°C

STERILE A

CE  
0481

Data aktualizacji ulotki: 10.2017  
OKRB101-01-1810

REV.0.10012.TT.MM.JJJ